



Centro de Información
de Medicamentos

Anexo N°1: Antidiabéticos inyectables

Compatibilidad entre agujas y lápices inyectoros

Para realizar una adecuada administración de la insulina, los lápices inyectoros requieren de agujas específicas. A continuación, detallaremos cada uno de los casos:

1. Agujas BD Ultra-Fine® de Becton, Dickinson and Company

Actualmente, cinco marcas comerciales de insulinas disponibles en nuestras farmacias son compatibles con las agujas BD Ultra-Fine®, las cuales pueden presentar un grosor y largo de **31Gx5mm (SKU 706299)**, **31Gx8mm (SKU 135065)** y **32Gx4mm (SKU 292353)**. La elección del grosor y largo depende de cada paciente.




Apidra® SoloStar
SKU 258140
Acción ultrarrápida




Lantus® SoloStar
SKU 258139
Acción prolongada



Toujeo® Lapicera
SKU 274372
Acción prolongada

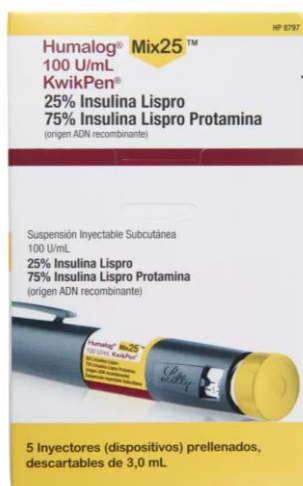

Humalog® Mix 25 KwikPen
SKU 266011
Insulina premezclada

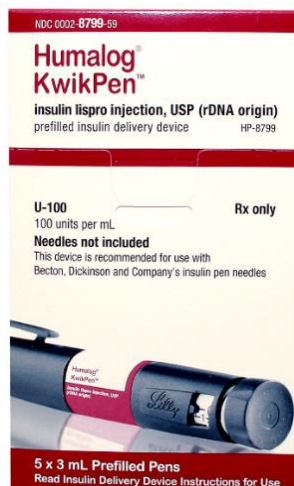

Humalog® KwikPen
SKU 260641
Acción ultrarrápida

2. Agujas NovoFine® o NovoTwist®

Actualmente, siete marcas comerciales de insulina disponibles en nuestras farmacias son compatibles con las agujas NovoFine® o NovoTwist® de hasta 8 mm de largo, lamentablemente estas agujas no se comercializan en Farmacias Cruz Verde, sin embargo, la marca Becton, Dickinson and Company han certificado que las agujas **BD Ultra-Fine®** son compatibles con su inyector en los siguientes casos:



Novomix® 30
SKU 252682
Insulina premezclada



Tresiba® FlexTouch
SKU 271486
Acción prolongada



Levemir® FlexPen
SKU 256511
Acción prolongada



NovoRapid® FlexPen
SKU 255906
Acción ultrarrápida

La excepción a esto corresponde a las presentaciones Actrapid® HM Penfill, Insulatard® HM Penfill y Novorapid® Penfill donde no se han podido certificar otras agujas como compatibles con su inyector, **debiendo emplearse solo las recomendadas por el fabricante.**



Actrapid® HM Penfill
SKU 172095
Acción rápida



Insulatard® HM Penfill
SKU 172088
Acción intermedia



Novorapid® Penfill
SKU 172094
Acción ultrarrápida

cim@cruzverde.cl
226944028 opción 4
*7700 opción 4